

**AIIP** *dental products*  
**Prime**

Instruções de Uso

**PASTA DE POLIMENTO  
DIAMANTADA**

# AllPrime - Pasta de Polimento Diamantada

## Pastas para Profilaxia e Polimento Dental

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

AllPrime - Pasta de Polimento Diamantada é produzida com diamante micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns), para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos. O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Pasta de Polimento Diamantada é uma pasta de polimento universal.

### 2. INDICAÇÃO:

A Pasta de Polimento Diamantada é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

### 3. COMPOSIÇÃO:

Polietilenoglicol, Hidróxido de sódio, Pó de diamante, Água e Aroma.

### 4. APRESENTAÇÃO:

AllPrime - Pasta de Polimento Diamantada:  
01 seringa de 2,0g;  
01 ponta aplicadora  
01 instrução de uso.

### 5. INSTRUÇÃO DE USO:

A pasta polidora deve ser usada com auxílio de discos de feltro ou discos aveludados em caneta de baixa rotação e contra-ângulo.

Deve-se adaptar com precaução o disco no contra-ângulo, confirmando se o mesmo está devidamente preso. É dispensado uma quantidade do produto no dente, de forma que seja a quantidade necessária para cobrir a área da restauração. Então, com o contra-ângulo montado, realiza-se o polimento da restauração, efetuando movimentos intermitentes sobre o elemento dentário, a fim de não promover o aquecimento do local.

Após o término do polimento, basta enxaguar o dente com água para remover a pasta.

### 6. DESINFECÇÃO E CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

Não há condições especiais de manipulação, quando o produto é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Descartar o produto conforme legislação local vigente.

### 7. PRECAUÇÕES:

Utilize sempre feltros novos para executar um polimento. O uso do mesmo disco de feltro com abrasivos de outras pastas pode comprometer o sucesso do polimento.

### 8. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Utilize baixa rotação e movimentos intermitentes com baixa pressão de aplicação do feltro sobre o dente. Desta forma previne-se aquecimento excessivo da superfície.

### 9. CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:

Não há contraindicações quando Pasta de Polimento Diamantada é utilizada por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda quando a técnica

estipulada não puder ser aplicada.

#### **10. VALIDADE:**

AllPrime - Pasta de Polimento Diamantada tem uma validade de 36 meses, a partir da data de fabricação, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original e mantido sob condições adequadas de armazenamento. A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade.

#### **11. ARMAZENAMENTO:**

Mantem o produto em sua embalagem original sempre bem fechada.  
Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 30°C / 41°F a 86°F.  
Não congele o produto.

#### **Fabricante e Detentor da Notificação:**

##### **Vigodent S/A Indústria e Comércio**

End.: Rua Pesqueira, 26 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - 21040-150  
CNPJ: 33.425.331/0001-22

Responsável Técnico  
Cátia Mara da Eira Hoehn  
CRQ/RJ 03212642 – 3ª região

**Notificação ANVISA nº: 20068879068**

**Cód AllPrime: 9781585**

