

## INSTRUÇÕES DE USO

### 1. Informações gerais do produto

<b>Nome Comercial</b>	Cera Odontológica
<b>Nome Técnico</b>	Cera Odontológica
<b>Enquadramento regulatório</b>	Dispositivo Médico – Classe I
<b>Modelos comerciais que compõem a família</b>	9780972 - Cera Utilidade AllPrime; 9780971 - Cera Rosa 7 AllPrime.
<b>Componentes</b>	Não se aplica
<b>Apresentações comerciais</b>	Embalagem primária de papel cartonado, apresentando: - 5 lâminas por caixa de Cera Utilidade AllPrime. Cada embalagem primária contém 180 g. - 18 lâminas por caixa de Cera Rosa 7 AllPrime. Cada embalagem primária contém 285 g.

### 2. Indicação de uso

As Ceras Odontológicas AllPrime são indicadas para modelagem, registro de mordida e fixação de dentes artificiais.

### 3. Princípio de funcionamento

As ceras odontológicas a base de parafina são desenvolvidas para todas as funções protéticas. Sua temperatura de amolecimento em torno de 35-45°C permite a sua modelagem, e as torna ideais para utilização intraoral. Apresentam alta estabilidade de borda e ruptura, bem como contração térmica extremamente baixa.

### 4. Modo de uso

Retirar uma ou mais lâminas, de acordo com o procedimento a ser executado.

Para amolecimento, flambar as lâminas com auxílio de uma lamparina ou mergulhá-las rapidamente em água morna.

Para registro de mordida, dobrar a lâmina ao meio.

Para demais aplicações, é possível recortar a cera, e, em forma de bastão aplicá-la sobre a base de acordo com a finalidade proposta.

## 5. Especificações Técnicas

Parâmetro	Especificação	
	Cera Utilidade	Cera 7 Rosa
Ponto de congelamento (°C)	57 - 65	57 - 65
Ponto de gota (°C)	35 - 46	35 - 46
Teor de cinzas (%)	0,000 - 0,004	0,000 - 0,004
Cor	Vermelha	Rosa
Espessura (mm)	4	1,5
Tamanho (cm)	14,0 x 6,9 x 4,0	15,0 x 7,5 x 1,5
Peso da embalagem primária (g)	180	285

## 6. Composição:

Parafina, ceras e corantes.

## 7. Validade

4 anos

## 8. Condições de armazenamento e transporte

Manter as ceras odontológicas embaladas, em local seco, protegidas do sol e longe de qualquer fonte de calor. A temperatura de armazenamento não deve exceder 25°C. Manter fora do alcance de crianças.

## 9. Condições de manipulação

Após utilização, descartar as ceras odontológicas de acordo com as leis e os regulamentos aplicáveis na sua localidade.

## 10. Advertências

Este produto é destinado ao uso apenas por profissionais qualificados.

Produto de uso único.

Não estéril.

## 11. Precauções

- Não permita que gotas de cera quente entrem em contato com a pele.
- Evite inalar a fumaça durante o processo de aquecimento/resfriamento da cera. Recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individual.
- Não deixe a cera na cavidade oral do paciente por um período muito longo.



- Verifique o tamanho ideal de cera para a cavidade oral de cada paciente e garanta a sua adesão adequada à boca, de modo a evitar engasgo ou deglutição.

## **12. Contraindicações**

As ceras odontológicas são contraindicadas para uso por pacientes com histórico conhecido de alergia aos seus componentes.

## **13. Efeitos adversos**

Não se aplica.

### **FABRICANTE LEGAL**

Morsa Wachswarenfabrik Sallinger GmbH

Nordstrasse, 3 D-86381, Krumbach - Alemanha

☎ +49 8282 800440

[info@morsa.de](mailto:info@morsa.de)

### **DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO**

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

CNPJ 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04.

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

**Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)**

**Notificação ANVISA nº 80801630077**

**Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870** ✉ [sac@dentalspeed.com](mailto:sac@dentalspeed.com)