



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Condicionador Ácido Fosfórico – AllPrime
Nome Técnico	Condicionador Ácido Fosfórico 37%
Enquadramento regulatório	Dispositivo Médico – Classe II
Modelos comerciais que compõem a família	Flowpack com três seringas de 3g e três pontas aplicadoras.
Componentes	Não se aplica
Apresentações comerciais	Flowpack com três seringas de 3g e três pontas aplicadoras.

2. Indicação de uso

É um gel com ácido fosfórico à 37% para preparação do tecido dental (dentina e esmalte) para adesão de materiais restauradores de exclusivo em consultório odontológico.

3. Princípio de funcionamento

O ácido fosfórico presente na formulação ao entrar em contato com os tecidos dentais (esmalte e dentina) realiza um ataque químico na parte inorgânica, com isso ocorre um aumento na área de superfície do dente aumentando os pontos de ancoragem mecânica em processos de adesão.

4. Modo de uso

- 1) Preparar a região que será condicionada com o produto (limpar e secar).
- 2) Aplicar o condicionador ácido na superfície por no mínimo 20 segundos (alguns produtos adesivos possuem o tempo de aplicação definidos pelo fabricante);
- 3) Após a aplicação retirar o produto utilizando água;
- 4) Secar o local para iniciar o procedimento.

5. Especificações Técnicas

Gutapercha	
Características físicas	- Viscosidade: 800 à 1100 cP; - Densidade: 0,9 à 1,4 g/cm ³ - pH: 0,2 a 0,5 Microbiológicas: Não Aplicável.
Composição	Água, glicerina bidestilada, ácido fosfórico, espessante e corante.

6. Validade

24 meses

7. Condições de armazenamento

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.

Proteger da incidência da luz solar direta.

Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C

Umidade até 75%

8. Condições de manipulação

Utilizar óculos de proteção durante a utilização do produto;

Evitar o contato com os tecidos moles, olhos e pele. Caso haja contato lavar imediatamente com água em abundância;

Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos

9. Advertências

Apenas para uso profissional;

Manter longe do alcance de crianças

10. Precauções

Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou se a embalagem estiver violada.

11. Contraindicações

Suspender o uso do produto em caso de reações alérgica

12. Efeitos adversos



Não se aplica.

FABRICADO POR

Nome: Bravi Industria e Comércio de Produtos Odontológicos S/A

Endereço: Rua José Pereira Liberato, 2405

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Razão Social: Bravi Industria e Comércio de Produtos Odontológicos S/A

CNPJ: 17.106.938/0001-93

Endereço: Rua José Pereira Liberato, 2405 – Itajaí – Santa Catarina

Responsável Técnico: Rodrigo Brandão Santos

Notificação ANVISA nº 80929719001

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 | sac@allprimedental.com.br