

INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Desincrustante SaniSud by AllPrime
Nome Técnico	Desincrustante Hospitalar
Enquadramento regulatório	Desincrustante de uso restrito em estabelecimentos de assistência à saúde com indicação para dispositivos médicos – Classe II RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 697, DE 13 DE MAIO DE 2022 - Dispõe sobre os requisitos de embalagem e rotulagem para o registro de produto saneante corrosivo à pele ou que cause lesão ocular grave. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 - Dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências.
Componentes	Tensoativo não iônico, ácido fosfórico e veículo.
Apresentações comerciais	1 Litro.

2. Indicação de uso

Utilizar o produto em: Instrumentais cirúrgicos e odontológicos inoxidáveis; Materiais de manicure inoxidáveis; Instrumentais veterinários inoxidáveis; compatível com limpeza manual por imersão.

3. Princípio de funcionamento

DESINCRUSTANTE SANISUD BY ALLPRIME possui o objetivo de promover a remoção de manchas e oxidações de instrumentais e materiais inoxidáveis.

4. Modo de uso

Diluir 1 litro em 6 litros de água aquecida entre 40°C e 50°C. Deixar o produto agindo durante 30 minutos, utilizando escova não metálica, se necessário, para auxiliar na remoção de manchas e incrustações. Enxaguar com água em abundância.

5. Especificações Técnicas

Gutapercha	
Características físicas	Aspecto: líquido branco. pH do produto puro à 25°C: 0,5 a 1,0. Densidade (g/ml) à 25°C 1,0 - 1,5. Solubilidade: solúvel em água.
Composição	Tensoativo não iônico, ácido fosfórico e veículo.

6. Validade

24 meses

7. Condições de armazenamento

Armazenar o produto em temperatura ambiente controlada. Elevadas temperaturas são prejudiciais ao produto e podem afetar a qualidade final da estabilidade.

8. Condições de manipulação

Utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a manipulação do produto. Depois de utilizar, lavar e secar as mãos.

9. Advertências

Não deixar armazenado em temperatura acima de 25°C. Não reutilizar a embalagem. Utilizar a solução imediatamente após o preparo. A reutilização da solução de limpeza pode provocar perda de eficiência.

10. Precauções



PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as,



se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte a respiração e contate imediatamente o Centro de Intoxicações – CEATOX (Disque Intoxicação 0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Tratamento específico. Contém ácido fosfórico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. CONSERVAÇÃO: Conservar em local fresco, seco e bem ventilado em temperatura ambiente, longe de fontes de calor, combustíveis e gases comprimidos.

11. Contraindicações

Não misturar com outros produtos.

12. Efeitos adversos

EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA: O contato direto pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Pode ocasionar alergias a pessoas sensíveis a componentes da formulação.

FABRICADO POR

Nome: Luckmann Indústria e Comércio de Produtos para Saúde LTDA. EPP
Rodovia SC 281, nº 4111, km 05 – Bairro Sertão do Maruim, CEP 88.122-001.
São José/SC - BRASIL

DETENTOR DO REGISTRO

Razão Social: Luckmann Indústria e Comércio de Produtos para Saúde LTDA. EPP
CNPJ: 74.196.031/0001-04
Rodovia SC 281, nº 4111, km 05 – Bairro Sertão do Maruim, CEP 88.122-001.
São José/SC - BRASIL

Responsável Técnico: Gabriela Lopes da Rosa Loruz Rodrigues – CRQ nº 13404545 / 13º Região SC.

Registro ANVISA nº 332360014

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 | sac@allprimedental.com.br