

AIIP *dental products*
Prime

Instruções de Uso

***Agulha para
Sutura Odontológica
com Fio de Seda***

AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA COM FIO DE SEDA

Indicação: É indicado para suturar superfícies gengivais após procedimentos cirúrgicos. Deverá ser utilizada somente por profissionais habilitados.

Composição: Agulha de aço inoxidável 304 e fio de seda trançado.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Contra indicações: Nenhuma por hora conhecida.

Modo de uso: Após o procedimento cirúrgico, proceder a sutura conforme a técnica de preferência do profissional.

Advertência/Cuidados especiais: Produto de uso único. Destruir após o uso. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.

Princípio de funcionamento: O uso intraoral do fio de sutura deve ser conduzido por dentistas ou pessoal com treinamento adequado.

O profissional manuseia o produto com alicate de uso odontológico através de punção com a agulha e inserção do fio na área gengival e posterior corte e descarte da agulha e amarração do fio.

Os materiais são atóxicos, não-absorvíveis e não impregnados.
Seu uso é de curto prazo, permanecendo na gengiva até 30 dias.

Apresenta-se com os números cirúrgicos de 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0 e pode ter 45cm ou 75 cm de comprimento. A agulha é fabricada em aço inoxidável forma triangular ou circular, com ângulos de 180° (1/2 círculo) ou 135° (3/8 do círculo). Estas têm comprimentos de 1,5 cm, 1,7cm ou 2,0 cm.

Produto estéril - Esterilizado por óxido de etileno.

Uso exclusivo para profissionais da saúde.

Produto de uso único.

Fabricante e Detentor da notificação ANVISA:

Wilcos do Brasil Ind. E Com. LTDA

Rua Quissama, 910 – Petrópolis/RJ

CNPJ: 01.074.837/0001-48

Responsável Técnico: Fábio Bastos de Carvalho Coppos

CRO-RJ: 32134

Notificação ANVISA nº 10347949038

Para Instruções de Uso, acesse nosso site:

allprimedental.com

