

INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Fórceps Odontológico
Nome Técnico	Fórceps Odontológico
Enquadramento regulatório	Correlato – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Fórceps Odontológico Infantil nº 1; Fórceps Odontológico Infantil nº 150S; Fórceps Odontológico Infantil nº 151S; Fórceps Odontológico Infantil nº 18D; Fórceps Odontológico Infantil nº 21; Fórceps Odontológico Infantil nº 27; Fórceps Odontológico Infantil nº 3; Fórceps Odontológico Infantil nº 4; Fórceps Odontológico Infantil nº 44; Fórceps Odontológico Infantil nº 46; Fórceps Odontológico Infantil nº 5; Fórceps Odontológico Infantil nº 6; Fórceps Odontológico Infantil nº 65; Fórceps Odontológico Infantil nº 68; Fórceps Odontológico Infantil nº 69; Fórceps Odontológico Inglês nº 16; Fórceps Odontológico Inglês nº 18L; Fórceps Odontológico Inglês nº 18R; Fórceps Odontológico nº 1; Fórceps Odontológico nº 101; Fórceps Odontológico nº 121; Fórceps Odontológico nº 13; Fórceps Odontológico nº 150; Fórceps Odontológico nº 151; Fórceps Odontológico nº 16; Fórceps Odontológico nº 17; Fórceps Odontológico nº 18; Fórceps Odontológico nº 18L; Fórceps Odontológico nº 18R; Fórceps Odontológico nº 2; Fórceps Odontológico nº 203; Fórceps Odontológico nº 210-H; Fórceps Odontológico nº 213; Fórceps Odontológico nº 22; Fórceps Odontológico nº 222;

	Fórceps Odontológico nº 23; Fórceps Odontológico nº 32; Fórceps Odontológico nº 33A; Fórceps Odontológico nº 51; Fórceps Odontológico nº 51A; Fórceps Odontológico nº 53L; Fórceps Odontológico nº 53R; Fórceps Odontológico nº 65; Fórceps Odontológico nº 67A; Fórceps Odontológico nº 68; Fórceps Odontológico nº 69; Fórceps Odontológico nº 7; Fórceps Odontológico nº 79; Fórceps Odontológico nº 99A; Fórceps Odontológico nº 99C.
Componentes	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagem primária unitária.

2. Indicação de uso

Instrumentais indicados para extração dentária.

3. Princípio de funcionamento

Instrumental de uso odontológico cujo princípio de funcionamento se baseia na remoção de dentes frouxos do encaixe ósseo na mandíbula.

4. Modo de uso

Visando à utilização correta e segura dos Fórceps, deve-se primeiramente proceder a seleção adequada do modelo compatível com o procedimento. O Fórceps Odontológico é um instrumento cirúrgico utilizado por cirurgião-dentista habilitado e com experiência em processos de extração dentária.

Em se tratando de produto não-estéril, o Fórceps deve ser esterilizado em autoclave antes do primeiro uso. Após sua utilização, o mesmo deve ser lavado com água destilada quente, escova de cerdas de náilon e detergente neutro, sendo em seguida reesterilizada.

Recomenda-se verificar atentamente todos os avisos, precauções e indicações do produto constantes na embalagem, antes da sua utilização.

5. Especificações Técnicas

Fórceps Odontológico	
Composição: Aço Inoxidável AISI 410	
Modelo	Indicação de Uso
Fórceps Odontológico Infantil nº 1	Utilizado para incisivos superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 3	Utilizado para molares superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 4	Utilizado para incisivos e caninos superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 5	Utilizado para incisivos inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 6	Utilizado para molares inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 18D	Utilizado para molares superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 21	Utilizado para pré-molares inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 27	Utilizado para molares superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 44	Utilizado para molares inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 46	Utilizado para incisivos inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 65	Utilizado para incisivos e raízes superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 68	Utilizado para raízes inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 69	Utilizado para raízes superiores e inferiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 150S	Utilizados para incisivos ,caninos e pré-molares superiores de pacientes pediátricos.
Fórceps Odontológico Infantil nº 151S	Utilizados para incisivos, caninos e pré-molares inferiores
Fórceps Odontológico Inglês nº 16	Utilizado para raízes superiores.
Fórceps Odontológico Inglês nº 18L	Utilizado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes.
Fórceps Odontológico Inglês nº 18R	Utilizado para molares superiores do lado direito e suas raízes.
Fórceps Odontológico nº 1	Indicado para extração de incisivos e caninos superiores.
Fórceps Odontológico nº 2	Indicado para extração de incisivo superior.
Fórceps Odontológico nº 7	Indicado para extração de pré-molar superior.

Fórceps Odontológico nº 13	Indicado para extração de pré-molar inferior/canino.
Fórceps Odontológico nº 16	Indicado para extração de primeiro e segundo molares inferiores do osso alveolar.
Fórceps Odontológico nº 17	Indicado para extração de primeiro e segundo molares inferiores do osso alveolar.
Fórceps Odontológico nº 18	Indicado para extração de molar superior esquerdo.
Fórceps Odontológico nº 18L	Indicado para extração de primeiro e segundo molares superiores esquerdos.
Fórceps Odontológico nº 18R	Indicado para extração de primeiro e segundo molares superiores direitos.
Fórceps Odontológico nº 22	Indicado para extração de molar inferior esquerdo/direito.
Fórceps Odontológico nº 23	Indicado para extração de molares inferiores de ambos os lados.
Fórceps Odontológico nº 32	Indicado para extração de molares e pré-molares superiores
Fórceps Odontológico nº 33A	Indicado para extração de raiz de incisivo inferior.
Fórceps Odontológico nº 51	Indicado para extração de raiz superior.
Fórceps Odontológico nº 51A	Indicado para processos de extração de raízes superiores.
Fórceps Odontológico nº 53L	Indicado para extração de molares superiores do lado esquerdo para canhotos.
Fórceps Odontológico nº 53R	Indicado para extração de molares superiores do lado direito para canhotos.
Fórceps Odontológico nº 65	Indicado para extração de raízes e fragmentos dentários do osso alveolar.
Fórceps Odontológico nº 67A	Indicado para extração de terceiro molar superior.
Fórceps Odontológico nº 68	Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores.
Fórceps Odontológico nº 69	Indicado para extração de raízes e fragmentos dentários superiores e inferiores do osso alveolar.
Fórceps Odontológico nº 79	Indicado para extração de terceiro molar esquerdo/direito.
Fórceps Odontológico nº 99A	Utilizado para incisivos e caninos superiores.
Fórceps Odontológico nº 99C	Utilizado para incisivos e caninos superiores.
Fórceps Odontológico nº 101	Indicado para uso universal para pré-molares.
Fórceps Odontológico nº 121	Indicado para extração de raiz residual superior.

Fórceps Odontológico nº 150	Indicado para extração dentária do osso alveolar.
Fórceps Odontológico nº 151	Indicado para extração dentária do osso alveolar.
Fórceps Odontológico nº 151S	Indicado para extração de dentes primários inferiores e raízes dentárias.
Fórceps Odontológico nº 203	Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados.
Fórceps Odontológico nº 210-H	Indicado para extração de terceiros molares superiores.
Fórceps Odontológico nº 213	Indicado para extração de pré-molares e caninos superiores.
Fórceps Odontológico nº 222	Indicado para extração de terceiros molares inferiores

6. Validade

Indeterminada

7. Condições de armazenamento

Os Fórceps devem ser armazenados em local seco e limpo sem irradiação solar direta, entre 5 a 40°C. Recomenda-se que os instrumentos sejam dispostos horizontalmente em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção. Para garantir a segurança e evitar contaminação, instrumentos esterilizados devem ser armazenados separadamente dos não esterilizados.

8. Procedimentos de limpeza

Os Fórceps devem ser tratados com cuidado durante transporte, limpeza, esterilização e armazenamento. Para informações adicionais sobre manuseio, limpeza, esterilização do instrumental siga as orientações da NBR 14332 de junho de 1999, disponível na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Os Fórceps devem ser limpos e esterilizados antes da utilização. Também devem ser lubrificados após cada limpeza e desinfecção por autoclavagem.

Para esterilização, utilizar ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F (Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado). Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

9. Advertências

Os Fórceps devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados.



Siga as orientações do fabricante para limpeza e desinfecção.

10. Precauções

Não se aplica.

11. Contraindicações

Não se aplica.

12. Efeitos adversos

Não se aplica.

FABRICADO POR

Medisporex Pvt Ltd

Khadim Ali Road 51310 - Sialcote

Paquistão

IMPORTADO POR

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

CNPJ 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekens (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630074

Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870 ✉ sac@dentalspeed.com