

INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Fórceps AllPrime
Nome Técnico	Fórceps Odontológico
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Fórceps Odontológico Infantil nº 1; Fórceps Odontológico Infantil nº 3; Fórceps Odontológico Infantil nº 4; Fórceps Odontológico Infantil nº 5; Fórceps Odontológico Infantil nº 6; Fórceps Odontológico nº 1; Fórceps Odontológico nº 2; Fórceps Odontológico nº 7; Fórceps Odontológico nº 13; Fórceps Odontológico nº 16; Fórceps Odontológico nº 17; Fórceps Odontológico nº 18; Fórceps Odontológico nº 18L; Fórceps Odontológico nº 18R; Fórceps Odontológico nº 22; Fórceps Odontológico nº 33A; Fórceps Odontológico nº 51; Fórceps Odontológico nº 51A; Fórceps Odontológico nº 65; Fórceps Odontológico nº 67A; Fórceps Odontológico nº 69; Fórceps Odontológico nº 79; Fórceps Odontológico nº 99A; Fórceps Odontológico nº 99C;

	Fórceps Odontológico nº 150; Fórceps Odontológico nº 150-1/2S SG; Fórceps Odontológico nº 151; Fórceps Odontológico nº 151S.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagem primária contendo 1 ou 11 unidades.

2. Indicação de uso

- Fórceps Odontológico Infantil nº 1: Utilizado para incisivos superiores de pacientes pediátricos.
- Fórceps Odontológico Infantil nº 3: Utilizado para molares superiores de pacientes pediátricos.
- Fórceps Odontológico Infantil nº 4: Utilizado para incisivos e caninos superiores de pacientes pediátricos.
- Fórceps Odontológico Infantil nº 5: Utilizado para incisivos inferiores de pacientes pediátricos.
- Fórceps Odontológico Infantil nº 6: Utilizado para molares inferiores de pacientes pediátricos.
- Fórceps Odontológico nº 1: Indicado para extração de incisivos e caninos superiores.
- Fórceps Odontológico nº 2: Indicado para extração de incisivo superior.
- Fórceps Odontológico nº 7: Indicado para extração de pré-molar superior.
- Fórceps Odontológico nº 13: Indicado para extração de pré-molar inferior/canino.
- Fórceps Odontológico nº 16: Indicado para extração de primeiro e segundo molares inferiores do osso alveolar.
- Fórceps Odontológico nº 17: Indicado para extração de primeiro e segundo molares inferiores do osso alveolar.
- Fórceps Odontológico nº 18: Indicado para extração de molar superior esquerdo.
- Fórceps Odontológico nº 18L: Indicado para extração de primeiro e segundo molares superiores esquerdos.
- Fórceps Odontológico nº 18R: Indicado para extração de primeiro e segundo molares superiores direitos.
- Fórceps Odontológico nº 22: Indicado para extração de molar inferior esquerdo/direito.
- Fórceps Odontológico nº 33A: Indicado para extração de raiz de incisivo inferior.
- Fórceps Odontológico nº 51: Indicado para extração de raiz superior.

- Fórceps Odontológico n° 51A: Indicado para extração de raízes superiores.
- Fórceps Odontológico n° 65: Indicado para extração de raízes e fragmentos dentários do osso alveolar.
- Fórceps Odontológico n° 67A: Indicado para extração de terceiro molar superior.
- Fórceps Odontológico n° 69: Indicado para extração de raízes e fragmentos dentários superiores e inferiores do osso alveolar.
- Fórceps Odontológico n° 79: Indicado para extração de terceiro molar esquerdo/direito.
- Fórceps Odontológico n° 99A: Indicado para extração de incisivos e caninos superiores.
- Fórceps Odontológico n° 99C: Indicado para extração de incisivos e caninos superiores.
- Fórceps Odontológico n° 150: Indicado para extração dentária do osso alveolar.
- Fórceps Odontológico n° 150-1/2S SG: Indicado para extração de incisivos superiores e bicúspides.
- Fórceps Odontológico n° 151: Indicado para extração dentária do osso alveolar.
- Fórceps Odontológico n° 151S: Indicado para extração de dentes primários inferiores e raízes dentárias.

3. Princípio de funcionamento

Não se aplica.

4. Modo de uso

Visando à utilização correta e segura dos Fórceps, deve-se primeiramente proceder a seleção adequada do modelo compatível com o procedimento. O Fórceps Odontológico é um instrumento cirúrgico utilizado por cirurgião-dentista habilitado e com experiência em processos de extração dentária.

Em se tratando de produto não-estéril, o Fórceps deve ser esterilizado em autoclave antes do primeiro uso. Após sua utilização, o mesmo deve ser lavado com água destilada quente, escova de cerdas de náilon e detergente neutro, sendo em seguida reesterilizada.

Recomenda-se verificar atentamente todos os avisos, precauções e indicações do produto constantes na embalagem, antes da sua utilização.

5. Composição

Aço inoxidável AISI 304 no cabo e aço inoxidável 420 nas demais partes do instrumento.

6. Validade

Indeterminada

7. Produto estéril?

Não. Para esterilização, utilizar autoclave com referência às seguintes condições:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F. Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado. Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

8. Condições de armazenamento

Os instrumentos devem ser armazenados em local seco e limpo sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

9. Condições de transporte

Os instrumentos devem ser transportados em local seco e limpo sem irradiação solar direta.

10. Advertências

Produto passível de reprocessamento.

Os fórceps devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados.

11. Precauções

Os instrumentos devem ser esterilizados e desinfetados antes da utilização.

12. Contraindicações

Não se aplica.

13. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICADO POR

J&J Instruments, LLC

Goodwin Place, 120 – Stratford, CT – Estados Unidos da América

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630021

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 – sac@allprimedental.com