

INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Instrumento Odontológico Não Articulado Cortante Air AllPrime
Nome Técnico	Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos
Enquadramento regulatório	Dispositivo Médico – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Alavanca Cryer esquerda; Alavanca Cryer direita; Alavanca Esquerda 3mm linha reta; Alavanca Esquerda curva redonda 3mm Alavanca Esquerda curva redonda 4mm; Alavanca Direita redonda 4mm; Alavanca Direita 3mm linha reta; Alavanca Direita curva redonda 3mm; Alavanca Flohr esquerda; Alavanca Flohr direito; Cureta 204S dupla; Cureta 204SD dupla; Cureta Gracey 11-12 Dupla; Cureta Gracey 1-2 Dupla; Cureta Gracey 13-14 Dupla Cureta Gracey 15/16 Dupla; Cureta Gracey 17/18 Dupla; Cureta Gracey 3-4 Dupla; Cureta Gracey 5-6 Dupla; Cureta Gracey 7-8 Dupla; Cureta Gracey 9-10 Dupla; Cureta H6/7 dupla; Cureta S5/33 dupla; Cureta S6/S7 dupla;

	Cureta Sickle 23 (foice) Cureta Sickle 313-314XSI (foice); Cureta U15 (formato em "U") Cureta U15/30 dupla (formato em "U"); Descolador Buser; Escavador G duplo; Escavador M duplo; Escavador P duplo; Esculpidor Heidemann 0; Esculpidor Heidemann 1; Esculpidor Heidemann 2; Esculpidor Holembach 3; Esculpidor Discóide Cleóide 1/2 duplo; Esculpidor Discóide Cleóide 3/6 duplo; Esculpidor Discóide Cleóide 89/91 duplo; Esculpidor Holembach 3S; Esculpidor Lecron; Esculpidor Osteo Mitchell; Esculpidor para resina anodizado F4; Esculpidor para resina anodizado F5; Esculpidor para resina anodizado F6; Esculpidor Ward 1; Esculpidor Ward 2; Cureta 204S Dupla Linha Standard; Cureta Gracey nº 1/2 Linha Standard; Cureta Gracey nº 3/4 Linha Standard; Cureta Gracey nº 5/6 Linha Standard; Cureta Gracey nº 7/8 Linha Standard; Cureta Gracey nº 9/10 Linha Standard; Cureta Gracey nº 11/12 Linha Standard; Cureta Gracey nº 13/14 Linha Standard; Cureta McCall nº 11/12 Linha Standard;
--	---

	Cureta McCall nº 13/14 Linha Standard; Cureta McCall ° 17/18 Linha Standard; Descolador Molt nº 9 Linha Standard; Esculpidor Discóide Cleóide nº 89/92 Linha Standard; Esculpidor Hollenback nº 3S Linha Standard; Sonda Milimetrada Nabers 2N; Alavanca Seldin 2 Linha Standard; Alavanca Seldin 1L Linha Standard; Alavanca Seldin 1R Linha Standard; Alavanca Apical 301 Linha Standard; Alavanca Apexo 301 Linha Standard; Alavanca Apexo 303 Linha Standard.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalados individualmente. Kit contendo 03 instrumentos.

2. Indicação de uso

Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

3. Princípio de funcionamento

Não se aplica.

4. Modo de uso

Os instrumentos devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados. Necessária a esterilização antes de cada uso.

5. Público destinado a utilizar o material

Profissionais da saúde

6. Composição:

Haste - Aço 304 - AISI (Instituto Americano de Ferro e Aço)



Ponta - 420 J2 - AISI (Intituto Americano de Ferro e Aço)

7. Validade

Indeterminada

8. Condições de armazenamento e transporte

Os instrumentos devem ser armazenados e transportados em local seco e limpo sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

9. Condições de manipulação

Todos os instrumentos devem ser tratados com cuidado, enquanto transporte, limpeza, esterilização e armazenamento.

Para esterilização, adotar ciclo padrão de 5 minutos a 134°C/274 °F ou 20 minutos a 121 °C/250 °F. Permitir que a autoclave finalize o ciclo de secagem.

10. Advertências

Os instrumentos devem ser esterilizados e limpos antes da utilização;

Também devem ser lubrificados após cada limpeza e desinfecção antes da autoclavagem;

Os instrumentos com trava devem ser mantidos destravados durante a desinfecção em autoclave.

11. Precauções

Os instrumentos devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados.

12. Contraindicações

Não se aplica.

13. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICANTE LEGAL

Medisporex Pvt Ltd.

Rodovia Khadim Ali, 51310 - Sialkot, Paquistão

☎ +92 52 3554148

info@medisporex.com

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

CNPJ 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04.

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630006

Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870 ✉ sac@dentalspeed.com