



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Instrumento Odontológico Não Articulado Cortante AllPrime
Nome Técnico	Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Sonda Milimetrada OMS + North Carolina; Lima Schuluger 9-10; Lima Hinschfeld 2 (5-11); Lima Hinschfeld 3-7; Descolador Freer; Cureta Perio Ponta Morse 0-00; Cureta Mini Five 5-6; Cortante de Black Duplo 8-9; Cortante de Black Duplo 29; Cortante de Black Duplo 28; Cortante de Black Duplo 14-15; Cureta Mc Call 1-10; Alavanca Cryer Direita; Alavanca Cryer Esquerda; Alavanca Direita Curva Redonda 3 mm; Alavanca Direita Curva Redonda 4 mm; Alavanca Direita Reta 3 mm; Alavanca Esquerda Reta 3 mm; Alavanca Esquerda Redonda 3 mm; Alavanca Esquerda Redonda 4 mm; Alavanca Flohr Direita; Alavanca Flohr Esquerda; Esculpidor Discóide Cleóide 89/91; Esculpidor Heidemann 0;

	Esculpidor Heidemann N°1; Esculpidor Heidemann N°2; Sonda Milimetrada OMS 10,5; Sonda Milimetrada OMS.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagem unitária ou kit contendo 3 instrumentos.

2. Indicação de uso

- Sonda Milimetrada OMS + North Carolina: Indicada para proporcionar melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais.
- Lima Schuluger 9-10: Indicada para uso em cirurgia e periodontia
- Lima Hinschfeld 2 (5-11) e 3-7: Indicado para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, como também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra óssea e infra-óssea.
- Descolador Freer: Indicado para sindesmotomia, descolamento ou diérese, para cirurgias em geral.
- Cureta Perio Ponta Morse 0-00: Indicada para procedimentos de periodontia.
- Cureta Mini Five 5-6: Indicada para remover o cálculo a partir da superfície do dente.
- Cortante de Black Duplo 8-9: Indicado para dentística para alisar paredes cavitárias principalmente de classe V em dentes anteriores, determina o contorno interno das cavidades e planificam paredes de esmalte.
- Cortantes de Black Duplo 28 e 29: Indicado para dentística para planificação do ângulo cavo-superficial gengival, arredondamento do ângulo axio-pulpar e determinação de rentação na parede gengival de cavidades classe "II".
- Cortante de Black Duplo 14-15: Indicado para a preparação de cavidades: áreas retentivas, linha interna de ângulos e remoção de cáries difíceis.
- Cureta Mc Call 1-10: Indicado para remover o cálculo a partir da superfície do dente.
- Alavancas: Indicadas para auxiliar em cirurgias de extração dentária.
- Alavancas Flohr: Indicadas para auxílio nas extrações de raízes dentárias.

- Esculpidor Discoide Cleoide 89/91: Instrumento duplo tendo o discóide para remoção de excesso de material e o cleóide como lâmina em forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal.
- Esculpidores Heidemann: Indicados para procedimentos odontológicos de dentística, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, com a finalidade de auxiliar o profissional compactar, preencher e modelar o material na restauração.
- Sondas Milimetradas OMS: Indicadas para sondagem de profundidade de bolsas periodontais.

3. Princípio de funcionamento

Não se aplica.

4. Modo de uso

Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Recomenda-se verificar atentamente todos os avisos, precauções e indicações do produto constantes na embalagem, antes da sua utilização.

5. Composição

Aço inoxidável AISI 304 no cabo e aço inoxidável 420 nas demais partes do instrumento.

6. Validade

Indeterminada

7. Produto estéril?

Não. Para esterilização, utilizar autoclave com referência às seguintes condições:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F. Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado. Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

8. Condições de armazenamento

Os instrumentos devem ser armazenados em local seco e limpo sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.



9. Condições de transporte

Os instrumentos devem ser transportados em local seco e limpo sem irradiação solar direta.

10. Advertências

Produto passível de reprocessamento.

Os instrumentos devem ser esterilizados e desinfetados antes da utilização.

11. Precauções

Os instrumentos devem ser manipuladas somente por profissionais qualificados e habilitados.

12. Contraindicações

Não se aplica.

13. Efeitos adversos

Não se aplica.

FABRICADO POR

J&J Instruments, LLC

Goodwin Place, 120 – Stratford, CT – Estados Unidos da América

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630020

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 – sac@allprimedental.com