



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Lima Endodôntica AllPrime
Nome Técnico	Limas para Odontologia
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Lima K 21 mm n° 06; Lima K 21 mm n° 08; Lima K 21 mm n° 10; Lima K 21 mm n° 15; Lima K 21 mm n° 20; Lima K 21 mm n° 25; Lima K 21 mm n° 30; Lima K 21 mm n° 35; Lima K 21 mm n° 40; Lima K 21 mm n° 45; Lima K 21 mm n° 50; Lima K 21 mm n° 55; Lima K 21 mm n° 60; Lima K 21 mm n° 70; Lima K 21 mm n° 80; Lima K 21 mm n° 90; Lima K 21 mm n° 100; Lima K 21 mm n° 110; Lima K 21 mm n° 120; Lima K 21 mm n° 130; Lima K 21 mm n° 140; Lima K 21 mm n° 15-40; Lima K 21 mm n° 45-80; Lima K 21 mm n° 90-140;

	Lima K 25 mm n° 06;
	Lima K 25 mm n° 08;
	Lima K 25 mm n° 10;
	Lima K 25 mm n° 15;
	Lima K 25 mm n° 20;
	Lima K 25 mm n° 25;
	Lima K 25 mm n° 30;
	Lima K 25 mm n° 35;
	Lima K 25 mm n° 40;
	Lima K 25 mm n° 45;
	Lima K 25 mm n° 50;
	Lima K 25 mm n° 55;
	Lima K 25 mm n° 60;
	Lima K 25 mm n° 70;
	Lima K 25 mm n° 80;
	Lima K 25 mm n° 90;
	Lima K 25 mm n° 100;
	Lima K 25 mm n° 110;
	Lima K 25 mm n° 120;
	Lima K 25 mm n° 130;
	Lima K 25 mm n° 140;
	Lima K 25 mm n° 15-40;
	Lima K 25 mm n° 45-80;
	Lima K 25 mm n° 90-140;
	Lima K 28 mm n° 06;
	Lima K 28 mm n° 08;
	Lima K 28 mm n° 10;
	Lima K 28 mm n° 15;
	Lima K 28 mm n° 20;
	Lima K 28 mm n° 25;
	Lima K 28 mm n° 30;
	Lima K 28 mm n° 35;

	Lima K 28 mm n° 40;
	Lima K 28 mm n° 45;
	Lima K 28 mm n° 50;
	Lima K 28 mm n° 55;
	Lima K 28 mm n° 60;
	Lima K 28 mm n° 70;
	Lima K 28 mm n° 80;
	Lima K 28 mm n° 90;
	Lima K 28 mm n° 100;
	Lima K 28 mm n° 110;
	Lima K 28 mm n° 120;
	Lima K 28 mm n° 130;
	Lima K 28 mm n° 140;
	Lima K 28 mm n° 15-40;
	Lima K 28 mm n° 45-80;
	Lima K 28 mm n° 90-140;
	Lima K 31 mm n° 06;
	Lima K 31 mm n° 08;
	Lima K 31 mm n° 10;
	Lima K 31 mm n° 15;
	Lima K 31 mm n° 20;
	Lima K 31 mm n° 25;
	Lima K 31 mm n° 30;
	Lima K 31 mm n° 35;
	Lima K 31 mm n° 40;
	Lima K 31 mm n° 45;
	Lima K 31 mm n° 50;
	Lima K 31 mm n° 55;
	Lima K 31 mm n° 60;
	Lima K 31 mm n° 70;
	Lima K 31 mm n° 80;
	Lima K 31 mm n° 90;

	Lima K 31 mm n° 100;
	Lima K 31 mm n° 110;
	Lima K 31 mm n° 120;
	Lima K 31 mm n° 130;
	Lima K 31 mm n° 140;
	Lima K 31 mm n° 15-40;
	Lima K 31 mm n° 45-80;
	Lima K 31 mm n° 90-140;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 06;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 08;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 10;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 15;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 20;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 25;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 30;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 35;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 40;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 45;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 50;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 55;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 60;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 70;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 80;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 90;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 100;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 110;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 120;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 130;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 140;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 15-40;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 45-80;
	Lima Hedstroem 21 mm n° 90-140;

	Lima Hedstroem 25 mm n° 06;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 08;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 10;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 15;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 20;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 25;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 30;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 35;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 40;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 45;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 50;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 55;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 60;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 70;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 80;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 90;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 100;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 110;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 120;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 130;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 140;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 15-40;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 45-80;
	Lima Hedstroem 25 mm n° 90-140;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 06;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 08;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 10;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 15;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 20;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 25;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 30;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 35;

	Lima Hedstroem 28 mm n° 40;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 45;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 50;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 55;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 60;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 70;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 80;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 90;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 100;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 110;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 120;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 130;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 140;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 15-40;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 45-80;
	Lima Hedstroem 28 mm n° 90-140;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 06;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 08;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 10;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 15;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 20;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 25;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 30;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 35;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 40;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 45;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 50;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 55;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 60;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 70;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 80;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 90;

	Lima Hedstroem 31 mm n° 100;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 110;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 120;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 130;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 140;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 15-40;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 45-80;
	Lima Hedstroem 31 mm n° 90-140;
	Lima Flex 21 mm n° 15;
	Lima Flex 21 mm n° 20;
	Lima Flex 21 mm n° 25;
	Lima Flex 21 mm n° 30;
	Lima Flex 21 mm n° 35;
	Lima Flex 21 mm n° 40;
	Lima Flex 21 mm n° 15-40;
	Lima Flex 25 mm n° 15;
	Lima Flex 25 mm n° 20;
	Lima Flex 25 mm n° 25;
	Lima Flex 25 mm n° 30;
	Lima Flex 25 mm n° 35;
	Lima Flex 25 mm n° 40;
	Lima Flex 25 mm n° 15-40;
	Alargador 21 mm n° 06;
	Alargador 21 mm n° 08;
	Alargador 21 mm n° 10;
	Alargador 21 mm n° 15;
	Alargador 21 mm n° 20;
	Alargador 21 mm n° 25;
	Alargador 21 mm n° 30;
	Alargador 21 mm n° 35;
	Alargador 21 mm n° 40;
	Alargador 21 mm n° 45;

	Alargador 21 mm n° 50;
	Alargador 21 mm n° 55;
	Alargador 21 mm n° 60;
	Alargador 21 mm n° 70;
	Alargador 21 mm n° 80;
	Alargador 21 mm n° 90;
	Alargador 21 mm n° 100;
	Alargador 21 mm n° 110;
	Alargador 21 mm n° 120;
	Alargador 21 mm n° 130;
	Alargador 21 mm n° 140;
	Alargador 21 mm n° 15-40;
	Alargador 21 mm n° 45-80;
	Alargador 21 mm n° 90-140;
	Alargador 25 mm n° 06;
	Alargador 25 mm n° 08;
	Alargador 25 mm n° 10;
	Alargador 25 mm n° 15;
	Alargador 25 mm n° 20;
	Alargador 25 mm n° 25;
	Alargador 25 mm n° 30;
	Alargador 25 mm n° 35;
	Alargador 25 mm n° 40;
	Alargador 25 mm n° 45;
	Alargador 25 mm n° 50;
	Alargador 25 mm n° 55;
	Alargador 25 mm n° 60;
	Alargador 25 mm n° 70;
	Alargador 25 mm n° 80;
	Alargador 25 mm n° 90;
	Alargador 25 mm n° 100;
	Alargador 25 mm n° 110;

	Alargador 25 mm n° 120; Alargador 25 mm n° 130; Alargador 25 mm n° 140; Alargador 25 mm n° 15-40; Alargador 25 mm n° 45-80; Alargador 25 mm n° 90-140; Alargador 28 mm n° 06; Alargador 28 mm n° 08; Alargador 28 mm n° 10; Alargador 28 mm n° 15; Alargador 28 mm n° 20; Alargador 28 mm n° 25; Alargador 28 mm n° 30; Alargador 28 mm n° 35; Alargador 28 mm n° 40; Alargador 28 mm n° 45; Alargador 28 mm n° 50; Alargador 28 mm n° 55; Alargador 28 mm n° 60; Alargador 28 mm n° 70; Alargador 28 mm n° 80; Alargador 28 mm n° 90; Alargador 28 mm n° 100; Alargador 28 mm n° 110; Alargador 28 mm n° 120; Alargador 28 mm n° 130; Alargador 28 mm n° 140; Alargador 28 mm n° 15-40; Alargador 28 mm n° 45-80; Alargador 28 mm n° 90-140; Alargador 31 mm n° 06; Alargador 31 mm n° 08;
--	--

	Alargador 31 mm n° 10; Alargador 31 mm n° 15; Alargador 31 mm n° 20; Alargador 31 mm n° 25; Alargador 31 mm n° 30; Alargador 31 mm n° 35; Alargador 31 mm n° 40; Alargador 31 mm n° 45; Alargador 31 mm n° 50; Alargador 31 mm n° 55; Alargador 31 mm n° 60; Alargador 31 mm n° 70; Alargador 31 mm n° 80; Alargador 31 mm n° 90; Alargador 31 mm n° 100; Alargador 31 mm n° 110; Alargador 31 mm n° 120; Alargador 31 mm n° 130; Alargador 31 mm n° 140; Alargador 31 mm n° 15-40; Alargador 31 mm n° 45-80; Alargador 31 mm n° 90-140;
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Blíster de poliestireno com 6 unidades

Imagens

- Limas K



- Limas Hedstroem



-Limas Flex





2. Indicação de uso

As limas endodônticas são indicadas para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas para ampliar e tornar a parede lisa e plana do canal radicular através de lixamento e polimento.

3. Princípio de funcionamento

Material para o preparo manual de ampliação e desbridamento do canal radicular.

4. Modo de uso

As limas endodônticas manuais devem ser utilizadas somente por profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

5. Composição

Parte ativa a base de aço inoxidável (contém níquel e cromo) e haste composta por polibutileno tereftalato (PBT);

6. Validade

Indeterminada

7. Produto estéril?

Não. Para esterilização, utilizar autoclave com referência às seguintes condições:

1. Temperatura 121 °C: 20 minutos ou mais;
2. Temperatura 126 °C: 15 minutos ou mais.

8. Condições de armazenamento

Deve ser armazenado em um lugar fresco e seco, longe de fonte de calor e de umidade.

9. Advertências

1. Só dentistas qualificados estão autorizados a usar.
2. Produto não estéril. Certifique-se de esterilizar este produto para cada uso.
3. Não utilize este produto, exceto para o serviço e tratamento odontológico. Use-o de acordo com o uso pretendido.

10. Precauções

1. Para evitar a infecção, esterilize o produto em autoclave e certifique-se de esterilização foi concluída antes de usar.
2. Escolha o tipo/modelo mais apropriado para cada caso e seguir o método geral.
3. Antes de usar, fora da cavidade oral, certifique-se que não existem deformações, arranhões e fissuras na lima.
4. Se a cabeça da lima é fina, longa ou grande, há possibilidades de quebrar ou torcer. Devido a isso, certifique-se de avaliar uma angulação racional e evite usar pressão excessiva.
5. Use óculos de segurança para proteger os olhos. Além disso, usar uma máscara protetora de poeira para evitar a inalação de poeira.
6. Proteja o paciente com o uso do lençol de borracha, para evitar queda ou ingestão acidentais.
7. Não utilize este instrumento para quaisquer fins, exceto para aplicativos listados acima.
8. Somente para uso por profissionais dentistas.
9. Este produto deve ser tratado como lixo médico quando descartado.
10. Descarte o produto se estiver danificado ou contaminado.
11. Após o uso, lave-o com escova e detergente/desincrustante profissional apropriado. A fim de retirar substâncias estranhas como fluidos e tecido corporais aderidos ao instrumento após cada utilização.
12. Em caso de desinfecção e limpeza através de equipamento ultrassônico, use o processo padrão adequado para evitar deterioração/desgaste da área de corte/fio da lima.
13. Use este produto com muito cuidado para evitar a perfuração dos dedos, pois a lima contém área/ponta afiada.
14. Existe risco de corrosão da lima em imersão por um período prolongado em NaOCl, EDTA ou outras substância.

11. Contraindicações

Contraindicado para pacientes com histórico de alergia aos seus componentes.

12. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICADO POR

MANI, INC.

8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi, 321-3231 – JAPÃO

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekens (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630001

Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870