



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Pasta Profilática – AllPrime
Nome Técnico	Pasta Profilática
Enquadramento regulatório	Dispositivo Médico – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	PASTA PROFILÁTICA ALLPRIME MORANGO - Embalagem Bisnaga contendo 50g, 90g ou 100g; - Embalagem Flowpack contendo 01 Bisnaga com 50g, 90g ou 100g; - Embalagem Cartonada contendo 01 Bisnaga com 50g, 90g ou 100g. PASTA PROFILÁTICA ALLPRIME TUTTI-FRUTII - Embalagem Bisnaga contendo 50g, 90g ou 100g; - Embalagem Flowpack contendo 01 Bisnaga com 50g, 90g ou 100g; - Embalagem Cartonada contendo 01 Bisnaga com 50g, 90g ou 100g.
Componentes	Não se aplica
Apresentações comerciais	A Pasta Profilática é comercializada unitariamente em dois aromas Morango ou Tutti-Frutti, sendo acondicionada em bisnagas (embalagem primária) podendo conter 50g, 90g ou 100g. As bisnagas podem ser acondicionadas em embalagem secundária Flowpack ou embalagem secundária Cartonada. Descrição das embalagens mencionadas: Embalagem primária: Bisnaga - parte interna em alumínio e parte externa em polietileno. Embalagem secundária: Flowpack constituído de substrato PET PE, gramatura 0.50mm; ou Cartonada: papel cartão triplex de 250g

2. Indicação de uso

A Pasta Profilática é indicada para procedimentos de profilaxia, auxiliando na remoção de manchas. Contém flúor.

3. Princípio de funcionamento



A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, ela confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida

4. Modo de uso

Aplicar pequena quantidade da pasta com a taça de borracha na superfície dos dentes, utilizando baixa rotação até completa remoção das manchas e placas. Em seguida, enxaguar.

5. Especificações Técnicas

Obturador Provisório com Fluor	
Características físicas	Parâmetros Organolépticos: Pasta com coloração acinzentada. Parâmetros Físico-químicos: Viscosidade de 1300 a 1500 cP; e Densidade de 1,1 a 1,3 g/cm ³ . Parâmetros Biológicos: Não Aplicável. Produto Estéril: Não Aplicável
Composição	Espessante, Água, Surfactante, Espessante, Conservante, Aromas, Abrasivos e Corantes.

6. Validade

24 meses

7. Condições de armazenamento

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.

Proteger da incidência da luz solar direta.

Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

Umidade até 75%.

8. Condições de manipulação

Utilizar óculos de proteção durante a utilização do produto;

Evitar o contato com os tecidos moles, olhos e pele. Caso haja contato lavar imediatamente com água em abundância;

Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos.



9. Advertências

PRODUTO NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO PROIBIDO DE REPROCESSAMENTO.

Apenas para uso profissional.

Leia com atenção todas as informações contidas nas Instruções de Uso antes da utilização do produto.

Guarde as Instruções de Uso para consulta até o consumo total do produto.

Respeite o prazo de validade.

Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado.

Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.

Mantenha fora do alcance de crianças.

10. Precauções

Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.

Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou se a embalagem estiver violada.

11. Contraindicações

Contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade aos componentes da formulação. Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

12. Efeitos adversos

Não se aplica.

FABRICADO POR

Nome: Bravi Industria e Comércio de Produtos Odontológicos S/A

Endereço: Rua José Pereira Liberato, 2405

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Razão Social: Bravi Industria e Comércio de Produtos Odontológicos S/A

CNPJ: 17.106.938/0001-93

Endereço: Rua José Pereira Liberato, 2405 – Itajaí – Santa Catarina



Responsável Técnico: Rodrigo Brandão Santos

Notificação ANVISA nº 80929710031

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 | sac@allprimedental.com.br