



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Ponta de Papel
Nome Técnico	Cone de Papel Absorvente
Enquadramento regulatório	Dispositivo Médico – Classe II
Modelos comerciais que compõem a família	Ponta De Papel Absorvente, Marcas Allprime Ou Allprime Select Ou Masterdent: 9781012 - Ponta De Papel Absorvente Nº 15-40; 9781013 - Ponta De Papel Absorvente Nº 45-80; 9781014 - Ponta De Papel Absorvente Nº 15; 9781015 - Ponta De Papel Absorvente Nº 20; 9781016 - Ponta De Papel Absorvente Nº 25; 9781017 - Ponta De Papel Absorvente Nº 30; 9781018 - Ponta De Papel Absorvente Nº 35; 9781019 - Ponta De Papel Absorvente Nº 40; 9781020 - Ponta De Papel Absorvente Nº 45; 9781021 - Ponta De Papel Absorvente Nº 50; 9781022 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 15-40; 9781023 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 45-80; 9781024 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 15; 9781025 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 20; 9781026 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 25; 9781027 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 30; 9781028 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 35; 9781029 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 40; 9781030 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 45; 9781031 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 50; 9781032 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 55; 9781033 - Ponta De Papel Absorvente Cellpack Nº 60;

	9781034 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 15-40; 9781035 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 45-80; 9781036 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 15; 9781037 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 20; 9781038 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 25; 9781039 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 30; 9781040 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 35; 9781041 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 40; 9781042 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 45; 9781043 - Ponta De Papel Absorvente Vials Nº 50; 9781044 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 15-40; 9781045 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 15; 9781046 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 20; 9781047 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 25; 9781048 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 30; 9781049 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 35; 9781050 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 40; 9781051 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 45; 9781052 - Ponta De Papel Absorvente Taper 4% Nº 50; 9781053 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 15-40; 9781054 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 15; 9781055 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 20; 9781056 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 25; 9781057 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 30; 9781058 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 35; 9781059 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 40; 9781060 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 45; 9781061 - Ponta De Papel Absorvente Taper 6% Nº 50;
Componentes	Não se aplica
Apresentações comerciais	As pontas de papel podem ser comercializadas em embalagens unitárias de polistireno, com 60, 100, 200, 240 ou 400 unidades.

	As embalagens primárias podem ser do tipo cellpack, estojos com vials individuais ou estojos com tampas deslizantes.
--	--

2. Indicação de uso

As pontas de papel absorvente são indicadas para remover a umidade do canal radicular ou introduzir medicamentos nesta região, em procedimentos endodônticos.

3. Princípio de funcionamento

Através do seu material de papel absorvente, é capaz de remover a umidade ou ainda introduzir medicamentos no canal radicular, em procedimentos endodônticos.

4. Modo de uso

1. Antes da sua utilização, verifique se existe alguma anormalidade na aparência do produto, como substâncias estranhas ou quebras/rachaduras.
2. Verifique se o produto se encontra dentro do prazo de validade permitido para a sua utilização.
3. Após a formação do canal radicular, selecione o tamanho adequado de encaixe à cavidade.
4. Utilize a ponta de papel absorvente para secar o canal radicular, aplicando a medicação necessária em seguida, se necessário.
5. Após utilização, descarte de acordo com as exigências sanitárias da sua localidade.

5. Especificações Técnicas

Ponta de Papel	
Características físicas	Alta solidez e absorção para conveniência do operador 100% irradiadas por raios Gama, garantindo um grau de esterilização de 10^{-6} Extremidades bem-acabadas sem pontas soltas Marcações de comprimento bem demarcadas: 16, 18, 19, 20, 22 e 24 mm
Composição	100% Papel

6. Validade

4 anos



7. Condições de armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente, em local seco e arejado, protegido da luz solar ou de fontes de calor.

8. Condições de manipulação

Após utilização, descarte o produto de acordo com as exigências sanitárias da sua localidade.

Produto de uso único.

9. Advertências

Produto estéril de uso único.

Produto de uso exclusivo odontológico

10. Precauções

Não utilize este produto caso se encontre fora do prazo de validade ou caso apresentar alguma anormalidade na sua aparência, como substâncias estranhas, quebras ou rachaduras.

11. Contraindicações

Não se aplica.

12. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICADO POR

Sure Dent Corporation

809, 52, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Coreia do Sul

☎ +82 31 737 4720

suredent@suredent.com

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

CNPJ 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekens (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801639011

Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870 ✉ sac@dentalspeed.com