



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Ponta de papel absorvente AllPrime
Nome Técnico	Cone de papel absorvente
Enquadramento regulatório	Dispositivo Médico – Classe II
Modelos comerciais que compõem a família	Ponta de papel absorvente nº 8; Ponta de papel absorvente nº 10; Ponta de papel absorvente nº 15; Ponta de papel absorvente nº 20; Ponta de papel absorvente nº 25; Ponta de papel absorvente nº 30; Ponta de papel absorvente nº 35; Ponta de papel absorvente nº 40; Ponta de papel absorvente nº 45; Ponta de papel absorvente nº 50; Ponta de papel absorvente nº 55; Ponta de papel absorvente nº 60; Ponta de papel absorvente nº 70; Ponta de papel absorvente nº 80; Ponta de papel absorvente nº 90; Ponta de papel absorvente nº 100; Ponta de papel absorvente nº 110; Ponta de papel absorvente nº 120; Ponta de papel absorvente nº 130; Ponta de papel absorvente nº 140; Ponta de papel absorvente nº 15-40; Ponta de papel absorvente nº 45-80; Ponta de papel absorvente nº 90-140; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 8;

	Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 10; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 15; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 20; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 25; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 30; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 35; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 40; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 45; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 50; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 55; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 60; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 70; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 80; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 90; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 100; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 110; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 120; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 130; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 140; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 15-40; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 45-80; Ponta de papel absorvente Cell Pack nº 90-140; Ponta de papel absorvente acessória XX-Fina; Ponta de papel absorvente acessória X-Fina; Ponta de papel absorvente acessória Fina; Ponta de papel absorvente acessória Média; Ponta de papel absorvente acessória Grossa; Ponta de papel absorvente acessória X-Grossa; Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 nº 15; Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 nº 20; Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 nº 25; Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 nº 30;
--	--

	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 35;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 40;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 45;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 50;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 55;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 60;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 70;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,04 n° 80;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 15;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 20;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 25;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 30;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 35;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 40;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 45;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 50;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 55;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 60;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 70;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,06 n° 80;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 15;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 20;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 25;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 30;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 35;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 40;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 45;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 50;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 55;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 60;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 70;
	Ponta de papel absorvente Special Taper 0,08 n° 80.

Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Ponta de papel absorvente disponível nas seguintes embalagens: 1 - Estojo com 6 compartimentos 60, 120, 180 ou 200 pontas 2 - Estojo com 6 compartimentos com abertura deslizável 60, 120, 180 ou 200 pontas 3 - Embalagem unitária com 6 frascos quadrados 60, 120, 180 ou 200 pontas 4 - Embalagem unitária com 6 frascos redondos 60, 120, 180 ou 200 pontas 5 - Embalagem Cell Pack 60, 120, 180 ou 200 pontas

2. Indicação de uso

As pontas de papel absorvente são usadas para secar a obturação do canal radicular e para limpar os canais que estão a ser selados/fechados no tratamento de canais radiculares.

3. Princípio de funcionamento

Secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos.

4. Modo de uso

Remover a ponta de papel com pinça esterilizada e introduzi-la dentro do canal com a parte mais fina no lado de dentro até atingir o comprimento de trabalho. Aguarde cerca de 5 segundos, remova a ponta molhada e descarte-a. Repita a operação até o ponto que após a inserção da ponta ela permaneça completamente seca após a remoção.

5. Público destinado a utilizar o material

Profissionais da saúde

6. Composição:

100% Polpa pura de papel (Papel filtro)

7. Validade

5 anos

8. Condições de armazenamento e transporte

Armazenar em temperatura ambiente, em local fresco e seco. Proteger contra a luz solar, térmica.

9. Condições de manipulação

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas na área odontológica.

10. Advertências

Produto estéril.

Uso único.

Uso exclusivo odontológico.

11. Precauções

- Deve ser usado cone de papel esterilizado;
- Não use cones tortos ou quebrados;
- Deve ter cuidado para evitar o sobre-enchimento ou espaço morto quando selador ou cimento aplicado;
- Use-o imediatamente quando aplicado selante ou cimento;
- Depois de usar as pontas de papel, deve ser mantido em local fresco;
- Não exponha à luz solar direta.

12. Contraindicações

Não se aplica.

13. Efeitos adversos

Não se aplica.



FABRICANTE LEGAL

META BIOMED CO., LTD.

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Coréia do Sul

☎ +82 43-230-8917

info@meta-biomed.com

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

CNPJ 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04.

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekens (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630008

Central de atendimento ao consumidor: 0800 701 6870 ✉ sac@dentalspeed.com