



INSTRUÇÕES DE USO

1. Informações gerais do produto

Nome Comercial	Tesouras AllPrime
Nome Técnico	Tesouras
Enquadramento regulatório	Dispositivos Médicos – Classe I
Modelos comerciais que compõem a família	Tesoura Iris Curva 11,5 cm; Tesoura Iris Curva Serrilhada 11,5 cm; Tesoura Iris Reta 11,5 cm; Tesoura Iris Reta Serrilhada 11,5 cm; Tesoura Kelly Curva 16 cm; Tesoura Kelly Reta 16 cm; Tesoura Mayo Curva 14 cm; Tesoura Mayo Curva 17 cm; Tesoura Mayo Reta 14 cm; Tesoura Mayo Reta 17 cm; Tesoura Goldman Fox Curva 13 cm; Tesoura Goldman Fox Reta 13 cm; Tesoura La Grange Curva 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Curva Romba-Romba 13 cm; Tesoura Cirúrgica Curva 14,5 cm; Tesoura Cirúrgica Reta Romba-Romba 13 cm; Tesoura Cirúrgica Reta 14,5 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Curva 14,5 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Reta 14,5 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Curva 10,5 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Curva 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Curva 9 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Reta 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Fina Reta 15 cm;

	Tesoura Cirúrgica Fina Reta 9 cm; Tesoura Cirúrgica Curva Fina-Romba 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Curva Fina-Romba 13 cm; Tesoura Cirúrgica Reta Fina-Romba 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Reta Fina-Romba 13 cm; Tesoura Cirúrgica Reta 16,5 cm; Tesoura Cirúrgica Curva Fina-Fina 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Curva Fina-Fina 13 cm; Tesoura Cirúrgica Reta Fina-Fina 11,5 cm; Tesoura Cirúrgica Reta Fina-Fina 13 cm; Tesoura Littauer 11,5 cm; Tesoura Littauer 14 cm; Tesoura Spencer Reta 9 cm; Tesoura Crown Reta 11,5 cm; Tesoura Crown Curva 11,5cm; Tesoura Metzenbaum Curva 14,5 cm; Tesoura Metzenbaum Curva 18 cm; Tesoura Metzenbaum Reta 14,5 cm; Tesoura Metzenbaum Reta 18 cm.
Acessórios	Não se aplica
Apresentações comerciais	Embalagem primária de polietileno com 1, 2 ou 6 unidades

2. Indicação de uso

Utilizadas em procedimentos cirúrgicos em geral, as Tesouras AllPrime são indicadas para aparar tecidos, cortar suturas e fios cirúrgicos.

3. Princípio de funcionamento

Não se aplica.

4. Modo de uso

Visando a utilização correta e segura das Tesouras, deve-se primeiramente proceder a seleção adequada do modelo compatível com o procedimento. Em posse deste, a Tesoura deve ser limpa e seca através de fricção de pano adequado a favor das lâminas. Em se tratando de produto não-estéril, a Tesoura deve ser esterilizada em autoclave antes do primeiro uso. Após sua utilização, a mesma deve ser lavada com água destilada quente, escova de cerdas de náilon e detergente neutro, sendo em seguida re-esterilizada.

Recomenda-se verificar atentamente todos os avisos, precauções e indicações do produto constantes na embalagem, antes da sua utilização. As Tesouras foram projetadas para uso por cirurgião-dentista com experiência e conhecimento em procedimentos especializados, sendo de sua responsabilidade familiarizar-se com as técnicas adequadas. Para uma melhor performance, o fabricante recomenda a lubrificação das articulações do instrumento a cada procedimento, com agentes lubrificantes apropriados.

5. Composição

Aço inoxidável AISI.

6. Validade

Indeterminada

7. Produto estéril?

Não. Para esterilização, utilizar autoclave com referência às seguintes condições:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F. Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado. Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

8. Condições de armazenamento

As tesouras devem ser armazenadas em local seco e limpo sem irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

9. Condições de transporte

As tesouras devem ser transportadas em local seco e limpo sem irradiação solar direta.

10. Advertências

Produto passível de reprocessamento.

As tesouras devem ser esterilizadas e desinfetadas antes da utilização.



11. Precauções

As tesouras devem ser manipuladas somente por profissionais qualificados e habilitados. Manipular com cautela para evitar acidentes pessoais.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos adversos

Não se aplica.

FABRICADO POR

J&J Instruments, LLC

Goodwin Place, 120 – Stratford, CT – Estados Unidos da América

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A. (CNPJ 13.612.214/0001-60)

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 – Galpões 02, 03 e 04

CEP 881047-785 Distrito Industrial, São José – SC – BRASIL

Responsável Técnica: Manoela Kluppel Riekes (CRF/SC 15.353)

Notificação ANVISA nº 80801630019

Central de atendimento ao consumidor: 0800 702 0227 – sac@allprimedental.com